



Název výrobku: **Rýžový agar**
Kód výrobku: **98005**
Zkratka výrobku: **RA**

Návod k použití

Použití:

Rýžový agar se používá jako medium pro identifikaci *Candida albicans* na základě tvorby chlamydospor.

Barva media:

průsvitná

Princip:

V mikrokultivaci lze rozlišit dle tvorby a tvaru chlamydospor druhy *Candida*.

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Rýžový extrakt	20,0
Agar	20,0
Tween 80	11,0

Výsledné pH $7,1 \pm 0,2$

Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup:

Inokulujte standartním způsobem


Kontrola kvality:

Candida parapsilosis CCM 8260 filamentace

Balení výrobku:

Misky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

