



Název výrobku: **Schaedler bujón 10ml**  
Kód výrobku: **98296**  
Zkratka výrobku: **Z-SCHB**

## Návod k použití

### Použití:

Schaedler bujón je vhodný pro kultivaci anaerobních mikroorganismů.

### Barva media:

Jantarově žlutá

### Princip:

Schaedler bujón je medium bohaté na růstové faktory jako je hemin a doplněné redukcími látkami jako je cystein a glukóza, je dokonale přizpůsobené na růst všech anaerobních mikroorganismů.

### Teoretické složení (g/l destilované vody):

Bujón Trypton-casein-sója	10,0
Speciální pepton	2,5
Kvasničný extrakt	5,0
TRIS pufr	3,0
L-cystein	0,4
Hemin	0,01
Glukóza	5,0


Výsledné pH  $7,6 \pm 0,2$

### Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Datum účinnosti: 1.1.2011  
Vydání: 2  
Výtisk: 1  
Strana: 1 (celkem 2)

 **V I A M A R**  
International s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
14000 Praha 4, ČR



## Pracovní postup

### Inokulace:

Inokulujte standardním způsobem

### Inkubace:

Inkubujte po dobu 18-24 hodin při 37 °C

### Kontrola kvality:

*Bacteroides fragilis* CCM 4712      růst

*Clostridium perfringens* CCM 4435      růst

*Streptococcus pyogenes* CCM 4425      růst

### Balení výrobku:

Zkumavky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.

Datum účinnosti: 1.1.2011  
Vydání: 2  
Výtisk: 1  
Strana: 2 (celkem 2)



V I A M A R  
International s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
14000 Praha 4, ČR

