



Název výrobku: **Sabouraud s glukózou - šikmý, malá zkumavka**
Kód výrobku: **98330**
Zkratka výrobku: **z-SAGL**

Návod k použití

Použití:

Sabouraud s glukózou-šikmý je obohacený sabouraudův agar o glukózu, určený ke kultivaci dermatofyt.

Barva média:

světle žlutá

Teoretické složení (g/l destilované vody):

Pepton	11,0
Glukóza	50,0
Agar	12,0

Výsledné pH 6,1±0,2

Uchování:

Médium uchovávat při teplotě od 4°C do 8°C.

Datum expirace a číslo šarže jsou uvedeny na obalu.

Pracovní postup:

Inokulace:

Výšetřovaný vzorek přímo vyočkujte.

Inkubace:

Inkubujte po dobu 1- 5 dní při 25-28 °C


Kontrola kvality:

Trichophyton rubrum růst

Balení výrobku:

Zkumavky balíme do perforované folie v minimálním množství 10 kusů.

Datum účinnosti: 1.1.2011
Vydání: 2
Výtisk: 1
Strana: 1 (celkem 1)

 **V I A M A R**
International s.r.o.
U Habrovky 247/11
14000 Praha 4, ČR

