

## ÚČEL POUŽITÍ - ČESKÝ JAZYK

Pro použití se systémem Macroduct Advanced Sweat Collection System k vyvolání pocení pro diagnostiku cystické fibrózy.

## OBSAH

6x Macroduct Advanced Collectors P1

12x Disky Macroduct Advanced Pilogel P2

6x Malé uzavíratelné nádoby P3

## UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### Složení

Disky Macroduct Advanced Pilogel obsahují 0,5 % nitrátu pilokarpinu, agar, methylparaben a propylparaben.

Disky Macroduct Advanced Pilogel jsou klasifikovány jako nebezpečné:  
Při každém iontoforetickém testu hrozí menší riziko popálení, viz návod k použití Macroductu.



### VAROVÁNÍ

- H302 – Zdraví škodlivý při požití.
- P264 – Po manipulaci si důkladně umyjte ruce, předloktí a obličej.
- P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.
- P301+P312 – Při požití: Pokud se necítíte dobře, zavolejte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM nebo lékaře.
- P330 – Vypláchněte ústa.
- P501 – Obsah/kontejner odevzdejte na autorizované sběrné místo odpadů.

## PŘÍPRAVA

Disky Macroduct Advanced Pilogel jsou připraveny k použití. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Používejte osobní ochranné pomůcky – ochranné rukavice.

## SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Uchovávejte v chladničce, ale nezmrazujte. Zmrazené nebo prasklé disky se nesmí používat.

Pevně nasadte uzávěr, aby nedošlo k dehydrataci disků. Disky, které ztratí vodu, se zmenší.

Disky jsou za běžných podmínek použití, skladování a přepravy nereaktivní.

### POŠKOZENÝ OBAL

Nepoužívejte, pokud je obalový materiál poškozen. Poškození gelů by mohlo mít vliv na výkon.

### POSTUP

Disky Macroduct Advanced Pilogel jsou určeny pouze pro zdravotnické nebo laboratorní pracovníky.

Přijměte běžná bezpečnostní opatření a dodržujte správnou laboratorní praxi.

Disky Macroduct Advanced Pilogel jsou určeny pouze na jedno použití.

Přečtěte si návod k použití přípravku Macroduct 3710.

### POŽADOVANÉ, ALE NEPOSKYTOVANÉ MATERIÁLY

Macroduct Advanced Sweat Collector System 3710.

### NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Materiály nebo pevné zbytky odstraňte na autorizovaném místě.

	Výrobce		Kód šarže/číslo šarže		Použit do data
	Obsah		Nepoužívat opakovaně		Čtete návod k použití
	Katalogové číslo		Omezení teploty		Zplnomocněný zástupce
	Výrobek 1		Výrobek 2		Výrobek 3
	Evropská shoda		Obsahuje léčivou látku		Zdravotnický prostředek



ELITechGroup Inc.  
370 West 1700 South  
Logan, Utah 84321  
Spojené státy americké



BioVendor  
LM®

BioVendor · Laboratorní medicína a.s.  
Karásek 1767/1, 621 00 Brno  
Czech Republic  
SRN: CZ-IM-000027009