



370 West 1700 South  
Logan, Utah 84321 USA  
435 752 6011  
800 453 2725  
fax 435 752 4127  
web [www.wescor.com](http://www.wescor.com)

Informace o produktu:

## Možnosti dezinfekce

### Macroduct® a Nanoduct® řemíneků a pásků

Kolej amerických patologů (College of American Pathologists - CAP) nedávno přidala na CAP Chemistry checklist novou otázku. Otázka CHM-29150 zní takto: „Má laboratoř alespoň jednou ročně zkontrolovat postupy uplatňované pro dezinfekci vybavení a zařízení používané pro odběr potních vzorků?“ Chcete-li postupovat v souladu s vyjádřením CAP, doporučuje firma Wescor následující:

Pro Websterův induktor potu a přístroj Nanoduct (elektrody, kryt přístroje, atd.) používejte nemocnicí schválené postupy pro dezinfekci povrchů otřením. Postupujte, prosím, vždy v souladu s pokyny výrobce. Macroduct konektory, Nanoduct senzory a Pilogel® disky jsou určeny na jedno použití.

Pro Macroduct nebo Nanoduct řemínky, pásky a další části přicházející do styku s kůží pacienta, je možné uplatnit tyto postupy:

#### Varianta 1\*

- Namočte řemínky a pásky na 30 minut do čerstvě připraveného roztoku domácího bělicího prostředku (jeden díl bělidla + devět dílů vody).
- Řemínky poté důkladně opláchněte pod tekoucí vodou.
- Nechte oschnout.

#### Varianta 2 \*

- Pásky a řemínky vložte do autoklávu a autoklávujte po dobu 30 minut při 121° C.
- Autokláfování není vhodné pro Nanoduct upínací pásky a Macroduct držáčky knoflíků elektrod (červený a černý), mohli by být tímto postupem poškozeny.

\* Poznámka: Po každém dezinfekčním postupu je nutné zkontrolovat, zda nejsou řemínky provedeným postupem poškozeny. Pokud ano, poškozený řemínek zlikvidujte.

#### Varianta 3

Řemínky a pásky lze rovněž používat jako spotřební materiál na jedno použití:

- Po každém použití pásky a řemínky zlikvidujte.
- Pro nákup nových řemíneků kontaktujte distributora firmy Wescor pro Českou republiku, firmu BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

#### Websterův induktor potu/ Macroduct® Sweat Collection System

Řemínek malý, velikost S (kat. č. SS-128), řemínek střední, velikost M (kat. č. SS-129), řemínek velký, velikost L (kat. č. SS-130), řemínek extra velký, velikost XL (kat. č. SS-131), sada řemíneků - S, M, L, XL (kat. č. SS-132); upínací pásek pro červenou elektrodu (kat. č. RP-382), upínací pásek pro černou elektrodu (kat. č. RP-381).

#### Nanoduct

Řemínek malý, velikost S (kat. č. RP-354), řemínek střední, velikost M (kat. č. RP-355), řemínek velký, velikost L (kat. č. RP-356), upínací pásek pro černou elektrodu (kat. č. RP-358), upínací pásek pro červenou elektrodu (kat. č. RP-357), přídatný upevňovací řemínek (kat. č. RP-353).

Pro informaci o ceně všech produktů, prosím, kontaktujte distributora firmy Wescor pro ČR, společnost BioVendor – Laboratorní medicína a.s.